

Wecan YM2000 Kabine scooter

Lukket kabinescooter med
strømlinet design.

- Sikkerhedssele
- Hurtig acceleration
- Med lys: både høj og lav, blink, horn
- Med varme og visker
- 2 **håndbrems**er til de hydrauliske skivebrems for og bag.
- Parkeringsbremse i højre side af kabinen
- Radio nem tilgængelig under styret
- Bluetooth
- USB til f.eks. opladning af mobiltilf.



Tekniske specifikationer:

Højde: 148 cm
Længde: 228 cm
Bredde: 169 cm

Egenvægt: 265 kg.
Totalvægt: 491 kg.

Motor: 2000W (2,0KW)

Max lastevægt: 150 kg. Inkl. passagerer.

Rækkevidde kommer an på batteripakken

Ladetid op til 8 timer. Der medfølger stik og ledning til alm. 220V



Farvemuligheder: Diverse, ring og forhør hvad vi har på lager
(Blå, orangemetal, sort)

Indledende information – Læses grundigt inden køretøjet tages i brug

- Køretøjet må aldrig overlæsses. Max 150 kg. Inkl. passageren. Jo mere vægt, jo kortere kørestrækning
- Kørselsflade: Køretøjet er designet til at køre på fladt vej underlag.
- Det elektroniske må ikke blive vådt. Pas på når køretøjet rengøres.
- Ved opstart skal man accelerere langsomt.
- Når batteriindikator viser under den 3. batteriblok, skal den oplades for at undgå skade på batterierne.
- Vær opmærksom på ikke at få stød af lade stikket.



Sikker færdsel


- Køretøjet er egnet til brugere med kørekort, eller med den rette træning. Hvis du er ny bruger bør du få oplæring/træning.
- Undgå blændende lys når det er mørkt, kørsel efter forholdene.
- Køretøjet må ikke bruges ved træthed. Man skal være frisk og årvågen.
- Sidespejlene skal være slået ud under kørsel.
- Brug af telefon eller lign. genstande under kørsel er ikke tilladt.
- Sørg for god indstilling af sædet under kørsel.



1. Blinklys.
2. Langt lys. Når den er tændt, lyser blå lampe
3. D er tændt ved kørsel fremad.
4. N er tændt ved neutral position.
5. R er tændt ved bak.
6. Forlygte indikator.
7. Batteri indikator.
8. Speedometer.
9. Kilometertæller.



1.  Styr lås, styr drejes mod venstre, inden man kan slukke
2.  Udtagning af nøgle.

3.  Motor startes, nøgle kan ikke fjernes.

1. Lys, lang/kort øverst
2. Blinkkontakt, næstøverst
3. Horn, den grønne kontakt
4. Katastrofe blinkkontakt, den røde kontakt



-
1. Frem/bak knap (fra venstre)
 2. Varme
 3. Vinduesvisker





1. Afbryder tændt på billedet. Kan betjenes
2. Afbryder slukkes ved skub mod venstre. Kan ikke betjenes.
3. Ladestik



Tjek jævnligt at bremsen er ok. Der skal i sluppet tilstand være en afstand på 10-20 mm.

Dæktryk:

Kontroller jævnligt dæktrykket.

Dækkene skal være afkølet ved tjek.

Fordæk dæktryk: 200 KPa (2,0 bar – 29 psi)

Bagdæk dæktryk: 250 KPa (2,5 bar – 36 psi)

Dæk kontrol:

Tjekkes jævnligt for slitage, dækmønster, punktering.

Det er vigtigt for optimal og sikker kørsel.

Forberedelse før kørsel

Sætte nøglen i tændingslåsen, drej den til position.

- Drej gashåndtaget langsomt, når der sættes i gang, giv ikke gashåndtag, når der decelereres.

◆ Advarsel:

- Ingen hurtig betjening af gashåndtaget, ellers vil køretøjet sætte ud af kontrol.

Bremseoperation:

1. Kontroller gashåndtaget

Hvis du vil sænke farten, skal du slippe gashåndtaget, og vigtigere er at bruge to bremse systemer.

- ◆ Advarsel: Kørsel på våd eller løst vejområde eller på regnfulde dage, vær forsigtig, især ved opbremsning, acceleration eller svingning.

1. Samtidig brug af for- og bagbremser

OBS: Når du kører ned ad en stejl skråning, slipper du gashåndtaget helt og bruger to bremsesystemer for at reducere hastigheden.

- ◆ Advarsel: Brug ikke enkeltbremse ved høj hastighed, især når du er på glat vej eller drejer om hjørner. Brug dobbeltbremser for at undgå ulykker.

Stoppe kørsel:

Drej tændingslåsen til position for at stoppe køretøjet, og lås styrlåsen.

- ◆ Advarsel: Elektrisk trehjulet kabinescooter skal parkeres på solidt, flad jord

Sikkerhed styrlås

- Lås parkeringslåsen, tag nøglen ud.
- Lås dør ved afgang.
- Koble alarm til på fjernbetjening

For at sikre el køretøjets sikkerhed og pålidelighed må der ikke ændres på det elektriske køretøj.

Brug originale dele eller tilsvarende dele af tilsvarende kvalitet under vedligeholdelse og udskiftning.

Hvis du bruger andre dele af dårlig kvalitet, vil det påvirke ydeevnen for elbiler og driftsfunktioner.

Advarsel: Sørg for at slukke for strømmen, parkere bilen på en flad hård overflade og meget solidt for at sikre personsikkerheden, uanset om det er vedligeholdelsesarbejde.

* Medmindre ejeren selv eller chaufføren får et komplet sæt af apparater til reparation og vedligeholdelse, og er kvalificeret mekanisk personale, ellers spørg fagfolk med ansvar for reparation og vedligeholdelse.

* Af sikkerhedsmæssige årsager foreslår vi, at disse projekter skal være af vedligeholdelsesafdelingen, der er ansvarlig for vedligeholdelse eller reparation.

Varsel:

Hvis der ofte forekommer kørsel på ujævne veje, kræves der mere vedligeholdelse.

Anbefalet service intervaller vedr. kabinescootere.

Man bør få et værksted til at lave en generel service på kabinescooteren, første gang efter 1000 km. og derefter hver 5000 km. der tilkommer.

Når den har kørt 1000 km. bør gearolien udskiftes, og derefter hver 10.000 km.

Bremsevæsken skal udskiftes første gang ved 50.000 km. og derefter ca. en gang om året, eller ved hver 25.000 km.